

Arbeitsanleitung

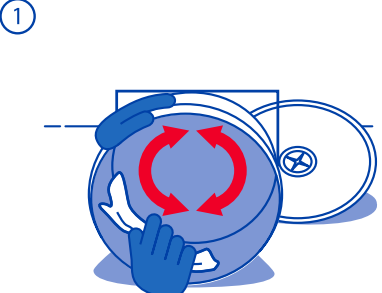
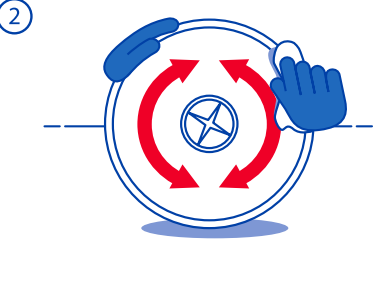

Aufbereitung von Henry Schein Eurosept Max® und EuroSept Plus® Dispenser / Spender Systemen


Vor jeder Wiederbefüllung eines Henry Schein Spendersystems ist eine Reinigung und Desinfektion dringend erforderlich. Neben möglichen chemothermischen und thermischen Verfahren ist die manuelle Aufbereitung mittels eines Henry Schein Wet-Wipe-Desinfektionstuch Eurosept Max® oder EuroSept Plus® möglich. Natürlich kann auch jedes andere handelsübliche Desinfektionstuch mit einem Ethanolgehalt von 45g genutzt werden. Es wird empfohlen, den Vliestuchspender vor der Aufbereitung einer visuellen Kontrolle zu unterziehen. Bei Abnutzungserscheinungen sind Deckel/Vliestuchspender abzutauschen. Zur Befüllung und Aufbereitung des Feuchttuchspenders und im Umgang mit Desinfektionsmitteln sind geltende Regeln des Personalschutzes zu beachten und geeignete Schutzausrüstung zu tragen (siehe BGR 250 / BGR 195 / BGR 206; Infos unter www.bgw-online.de). Die VAH-Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vorranksystem für die Flächendesinfektion¹ und die Mitteilung der VAH „Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil“² sind zu beachten. Im Falle eines mikrobiologischen Befundes sind neben der Aufbereitung auch die Befüllung, Anwendung und ggf. weitere Parameter als mögliche Ursache in Betracht zu ziehen und zu überprüfen.

¹ Hyg Med 37. Jahrgang 2012, Mitteilung 3/2012 Empfehlung zur Kontrolle kritischer Punkte bei der Anwendung von Tuchspendersystemen im Vorranksystem für die Flächendesinfektion

² Hyg Med 38. Jahrgang 2013, Mitteilung 1/2013 Kontrollmaßnahmen bei der Anwendung von Tuchspendersystemen für die Flächendesinfektion in Abhängigkeit vom Risikoprofil

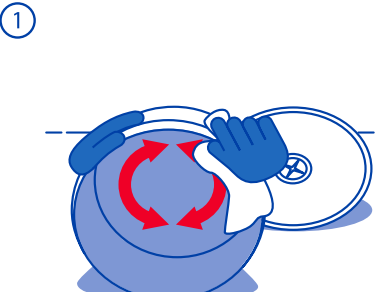

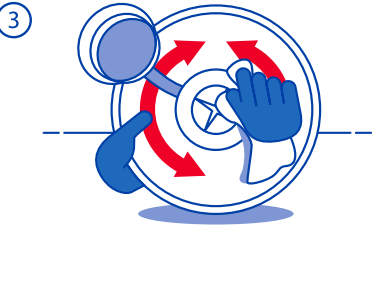
REINIGUNG ① bitte immer ein neues, ungebrauchtes Tuch verwenden.


		
<p>1. Innenseiten und Rand des neuen oder restentleerten Spenders mit dem Reinigungstuch gründlich reinigen.</p>	<p>2. Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich reinigen.</p>	<p>3. Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich reinigen</p>



1 min. Gesamtreinigung

DESINFEKTION ② bitte immer ein neues, ungebrauchtes Tuch verwenden.

		
<p>1. Innenseiten und Rand des Spenders mit dem Desinfektionstuch gründlich abwischen.</p>	<p>2. Deckelinnenseiten, Rand des Deckels, Innenflächen und Ränder der Entnahmeöffnung gründlich abwischen.</p>	<p>3. Deckelaußenseiten und Außenflächen des Spenders gründlich abwischen</p>



1 min. Wischdesinfektion